

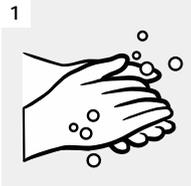
Рекомендации по использованию с моющими средствами			Нитриловые		Латексные	
Химические средства	Конц., %	CAS-Но.	Комфорт	Универсальные	Многоцелевые	Усиленные
Уксусная кислота	50	64-19-7	3	4	5	6
Ацетон	100	67-64-1	0	0	0	0
Этоксилаты алкилового спирта (C12-C16)	15	68213-23-0	6	6	6	6
Бутилгликоль	20	111-76-2	5	6	0	3
Лимонная кислота, насыщенный раствор	50	77-92-9	6	6	6	6
Диэтиламин	25	109-89-7	0	1	0	0
Этанол	20	64-17-5	6	6	5	6
Алкоксилата жирного спирта	15	10389-01-8	6	6	6	6
Формальдегид	25	50-00-0	6	6	6	6
Муравьиная кислота	85	64-18-6	1	2	3	4
Глютаральдегид	25	111-30-8	6	6	6	6
Соляная кислота	37	7647-01-0	4	6	3	6
Пероксид водорода	30	7722-84-1	4	6	6	6
Изопропанол	70	67-63-0	3	4	1	4
Фосфорная кислота	30	7664-38-2	6	6	6	6
Гидроксид калия	30	1310-58-3	6	6	6	6
Четвертично-аммонийные соединения	15	106233-03-8	6	6	6	6
Натрия додецилсульфат	15	151-21-3	6	6	6	6
Сульфаминовая кислота	20	5329-14-6	6	6	6	6
Скипидар (масляный)	100	8006-64-2	4	6	0	0

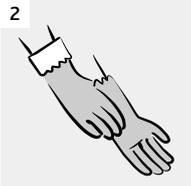
Все рекомендации, приведенные в таблице, основаны на результатах лабораторных тестов или экстраполяции лабораторных результатов. Тесты проводились стандартными методами, которые могут не совпадать на 100 % с условиями конечного использования. Все приведенные данные служат лишь рекомендацией.

Сквозное время разрыва, в соответствии с EN 374 (минут)

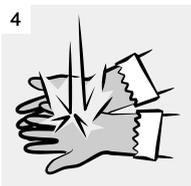
0	1	2	3	4	5	6
<10'	10–30'	30–60'	60–120'	120–240'	240–480'	>480'
Не рекомендовано	Защита от брызг	Средний класс защиты		Высокий класс защиты		

Рекомендации по использованию перчаток

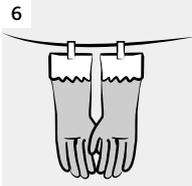
- 

Перед тем, как надеть перчатки
Вымойте и тщательно осушите руки перед тем, как надеть перчатки.
- 

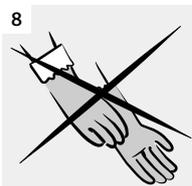
Как надевать перчатки
Поверните манжету перчатки, чтобы предотвратить попадание жидкости внутрь.
- 

Длительность использования
Не используйте одну и ту же пару перчаток слишком долго. Если необходимо длительное использование, следуйте рекомендациям по использованию моющих средств между 2–3 парами.
- 

Помойте перчатки после использования
Прежде чем снять перчатки, обязательно их промойте: после контакта с щелочами и кислотами – ополосните водой и высушите, после контакта с растворителями – вытрите досуха.
- 

Как снимать перчатки
Не дотрагивайтесь до внешней стороны перчаток, когда снимаете их, чтобы избежать контакта с моющими средствами или бактериями.
- 

Как хранить использованные перчатки
Обеспечьте возможность сушки перчаток до следующего использования: например, подвесив их на вешалку в ряд.
- 

Уход за руками
После снятия перчаток вымойте руки и используйте соответствующий крем.
- 

Не используйте поврежденные перчатки
Не используйте поврежденные перчатки (например, с дырами или разрывами).